

TRANSFER HULPMIDDELEN

ALTIJD DE BESTE KEUZE...

VEILIG EN COMFORTABEL

EWAC

MEDICAL

We get you moving



www.ewacmedical.nl

Universele plafondlift (UCH)

De universele plafondlift is een op een rail gemonteerde tilmodule die gebruiksvriendelijk en krachtig genoeg is om til- en verplaatsingsprocedures uit te voeren in vrijwel alle professionele zorgomgevingen. De tilmodule is eenvoudig te bedienen en helpt om til- en verplaatsingsprocedures veilig, eenvoudig en comfortabel te maken voor zowel de gebruiker als het verplegend personeel.

De tilmodule laadt zichzelf op via de rails, ongeacht waar in het systeem hij zich bevindt. Dit zorgt ervoor dat de plafondlift altijd klaar is voor gebruik. Deze tilmodule is speciaal ontworpen voor de werkomstandigheden die kenmerkend zijn voor professionele zorgomgevingen en is gedimensioneerd om regelmatig zware lasten aan te kunnen. De UCH is de ideale keuze voor veel verschillende til- en verplaatsingsprocedures, en kan ook worden gebruikt ter ondersteuning bij andere zorgtaken, mobilisatie-oefeningen, training en revalidatieprogramma's.



Er zijn verschillende versies van de UCH tilmodule beschikbaar en de module kan worden geconfigureerd en aangepast aan individuele behoeften met betrekking tot functionaliteit, specificaties en budget. De UCH is verkrijgbaar in modellen met een hefvermogen van respectievelijk 200 en 250 kg. De UCH kan worden uitgerust met een ingebouwde motor voor horizontale beweging langs de traverse rail, waarbij de hefmodule wordt bediend met een handbediening of infrarood (IR) afstandsbediening.



Universele sling

De Basic sling is een algemene tilband die geschikt is voor een grote verscheidenheid aan zorgvragers en tilactiviteiten. De tilband ondersteunt het hele lichaam behalve het hoofd.

De tilband is ideaal voor het tillen, verplaatsen en positioneren van zorgvragers die hun hoofd kunnen controleren maar minder controle hebben over hun boven- of onderlichaam. Hij kan worden gebruikt vanuit een zittende of liggende positie - bijvoorbeeld vanuit een bed of rolstoel - De Basic tilband is ontworpen als een algemene tilband voor de meeste tilsituaties.

De Basic sling is verkrijgbaar in verschillende maten en twee verschillende materialen, polyester of polyester net, die gebruikt kunnen worden als badsling. Beide materialen zijn zeer duurzaam en gemakkelijk om mee te werken. Ze laten lucht rond het lichaam circuleren en bieden de zorgvrager uitstekend comfort en steun.



Het standaard tilvermogen is tot 255 kg; het tilvermogen van de 3XL is echter 500 kg. Op de sling vindt u een label met een QR-code die u naar een mobiele site brengt met links naar instructievideo en gebruikershandleiding.

De sling kan worden gebruikt met alle plafondtakels en mobiele liften.

Voor meer informatie over hoe u het juiste tiljuk en de juiste maat kiest, kunt u de onderstaande maattabel raadplegen.

Het gebruik van het juiste tiljuk is essentieel voor efficiënte transfers om comfort en veiligheid voor de zorgvrager en zorgverlener te garanderen.

Guidelines on choosing the size of a sling

ABC Slings	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	4 - 6	6 - 10	10 - 14							
H	45 - 60	55 - 70	68 - 80	75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102
W1	25 - 30	28 - 35	33 - 38	33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58
W2 ^{x)}		60 - 95	65 - 100	70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150	
W2 ^{xx)}		28 - 35	33 - 38							

W2 = Chest measurements

x) Guideline for choosing Active Trainer

xx) Guideline for choosing Active Vest Kids

All dimensions in cm

Zwembad tillift stoel zelfrijdend


- Zitting en rug HT vulling.
- Hijsogen op rugleuning en voorpoten.
- Afzonderlijk opklapbare armsteunen, ergonomisch gevormd.
- Armleuningen van aluminium, wit gecoat.
- Roestvaststalen zwenkwielen Ø 125 mm met dubbele rem en kunststof 24" zwenkwielen met rem en hoepel.
- Verstelbare en opklapbare voetsteunen.
- Alleen leverbaar in zithoogte 490 mm.
- Alleen leverbaar in rvs 316 gepolijste uitvoering.
- Maatwerk niet mogelijk.



Zwembad tillift stoel

- Zitting en rug HT bekleed.
- Hijsogen op rugleuning en voorpoten.
- Afzonderlijke opklapbare armleuningen, ergonomisch gevormd. in aluminium, met een witte coating.
- Vier roestvrijstalen zwenkwielen, Ø 125 mm met dubbele rem.
- Verstelbare en opklapbare voetsteunen.
- Alleen leverbaar in zithoogte 490 mm.
- Alleen leverbaar in rvs 316 gepolijst uitvoering beschikbaar.
- Maatwerk niet mogelijk.



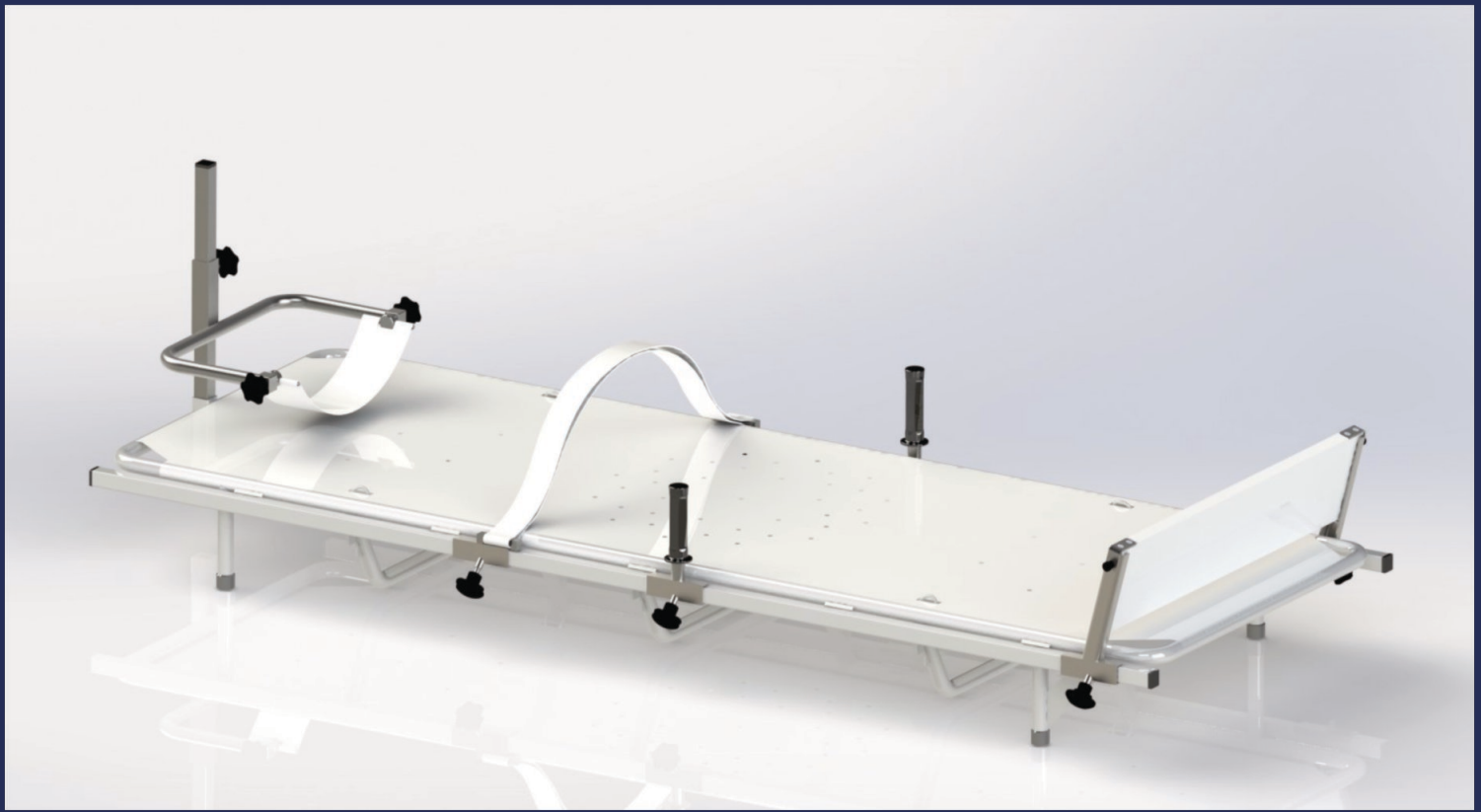

Universeel Stretcher met Trolley

- Ligvlak HT vulling.
- Vier roestvrijstalen zwenkwielen, Ø 125 mm met dubbele rem.
- Verstelbare hoofd- en voetensteun.
- Set handgrepen en fixatieband.
- Bovenste frame is afneembaar van onderste frame en voorzien van hijsogen.
- Alleen leverbaar in de aangegeven maten met lengte 1905 mm.
- Alleen verkrijgbaar in roestvrij staal 316 gepolijste uitvoering.
- Maximaal gebruikersgewicht 150 kg.
- Gewicht: 11 kg.
- Afmetingen: 1905 x 660 x 250 mm.



(Combi) badlift

Multifunctioneel badzitje voor optimale ondersteuning.

In een zorgbadkamer is een badlift onmisbaar! Een badlift zorgt ervoor dat mensen met een mobiliteitsbeperking gebruik kunnen blijven maken van het bad. Met de badlift kunnen cliënten zonder enige moeite in en uit een hoog/laag bad stappen. Dit is belangrijk in een (brand)zorginstelling, want hoog/laag baden worden niet alleen gebruikt voor de verzorging van cliënten, maar bieden ook een stukje ontspanning en therapie.

Ergonomische badlift

Onze badlift is uitstekend geschikt voor een veilige en comfortabele transfer van bed naar bad. Doordat de badlift elektrisch in hoogte verstelbaar is, kan de zorgverlener zelf de juiste werkhoogte instellen. De badlift is leverbaar met een badzitje en/of badbrancard.

Tijdens het baden hoeft de cliënt de stoel of stretcher niet te verlaten. Dit verhoogt de efficiëntie voor zowel de cliënt als de zorgverlener.



Kenmerken badlift:

- Zitting en ligvlak van de bad lifter zijn gemaakt van zacht, duurzaam en waterdicht materiaal.
- Zitting is voorzien van een toiletopening met een deksel.
- Met twee afneembare zijkanten wordt de zitting van de bad lifter een stretcher waar de cliënt op kan liggen.
- Compact chassis.
- Innovatieve zwenkwielen.
- Comfortabele rugleuning.



Zwembadlift

De zwembadlift is speciaal ontworpen voor gebruik aan de rand van een zwembad. Dit takelsysteem maakt het mogelijk voor mensen om het water in te gaan die normaal gesproken niet via een trap of ladder in het zwembad zouden kunnen komen. De zwembadlift helpt hierbij op een gemakkelijke en veilige manier.



SPECIFICATIES

- Voor personen met een gewicht tot 150 kg.
- Schokvrije hoogteverstelling door elektrische aandrijving.
- Geïntegreerde elektronisch gestuurde batterijlader.
- Mobiele pneumatische handbediening met een 2 m lange bedieningskabel, zodat de therapeut altijd dicht bij de cliënt kan zijn - zelfs in het water.

GEBRUIK

- De zwembadlift kan worden uitgerust met een zitje of bank en met of zonder trolley.
- Gemonteerd met 4 composiet ankers op de vloer of balustrade.
- Als alternatief kan de verwijderbare zwembadlift worden gemonteerd met een grondcontactdoos.
- Individuele aanpassing aan verschillende zwembaden, met of zonder balustrade.
- Robuust door roestvrij staal bekleed met kunststof.





EWAC Medical is gecertificeerd volgens:
 ISO 9001
 ISO 13485
 door Lloyd's Register Nederland

EWAC Medical
 Galileistraat 20
 1704 SE Heerhugowaard
 Nederland



+31 (0)226 313 457
 medical@ewac.com
 www.ewacmedical.nl